

RÉCHAUFFER LE LAIT

EN UTILISANT LE CHAUFFE-LAIT SANS EAU

Indications

Le réchauffement est indiqué seulement pour le lait qui va être donné en dedans d'une heure. Le lait donné sur plus d'une heure ne peut être amené qu'à température ambiante sur le comptoir.

Matériaux

- Nouvelle plaque d'insertion
- Chauffe-lait sans eau de Medela®
- Seringue ou bouteille de lait

Points essentiels

- Le lait réchauffé doit être donné dans l'heure qui suit.
- Le temps de réchauffement dépend du volume du boire - plus de volume, plus le temps est long.
- La plaque d'insertion doit être remplacé Q24h - une fois par jour, lors de la première boire de la journée.
- Ne partagez jamais la même plaque d'insertion entre des différents patients.
- Un nettoyage générale de la machine va se faire par les préposés les mercredis soirs.

Étapes





1. Installez la plaque d'insertion dans la cavité du chauffe-lait et étendez-là uniformément sur les parois internes.
2. Insérez le contenant ou la seringue pour être réchauffer.
3. Allumez la machine.
4. Choisissez le mode « WARM ». Appuyez « ENTER ».
5. Choisissez la température de départ (réfrigérée – icône de réfrigérateur). Appuyez « ENTER ».
6. Choisissez le volume de lait en mL. Appuyez « ENTER ». Fermer le couvercle.
7. Appuyez « START ».
8. Quand la machine émet le signal sonore, ouvrez le couvercle et enlevez le contenant ou la seringue. Prêt à servir!

Chauffe-lait Waterless Milk Warmer^{MC}

medela 

Instructions de mise en marche rapide

Installation

<p>1 Prenez une nouvelle plaque d'insertion. Inscrivez les informations de la patiente sur la plaque.</p> 	<p>2 Installez la plaque d'insertion dans la cavité du chauffe-lait et étendez-la uniformément sur les parois internes.</p> 	<p>3 Placez le contenant ou la seringue pour être réchauffer.</p> 	<p>4 Appuyez sur l'interrupteur pour la mise en marche de l'appareil.</p> 
--	--	---	--

Réchauffer ou Décongeler

<p>5 Choisissez le mode désiré</p> <p>WARM</p> <p>Sélectionnez l'option «WARM» (chaud) :</p> <p>Appuyez sur «ENTER» (entrée)</p>	<p>6 Choisissez la température</p> <p>Réfrigérée Ambiante Congelée</p> <p>Sélectionnez la température de départ</p> <p>Appuyez sur «ENTER» (entrée)</p>	<p>7 Sélectionner le volume</p> <p>000 mL</p> <p>Utilisez les flèches</p> <p>pour indiquer le volume de lait à chauffer</p> <p>Appuyez sur «ENTER» (entrée)</p> <p>Remarque : Maintenez la flèche appuyée pour avancer plus rapidement</p>	<p>8 Commencer</p> <p>start</p> <p>Appuyez sur le bouton «START» (départ) pour commencer le cycle</p>	<p>9 Terminer</p> <p>Lorsque le cycle est terminé, le chauffe-lait émet un signal sonore et une lumière clignote.</p> <p>Ouvrez le couvercle.</p> <p>Retirez le contenant de la plaque d'insertion.</p>
<p>Décongélation</p> <p>THAW</p> <p>Sélectionnez l'option «THAW» (décongélation) :</p> <p>Appuyez sur «ENTER» (entrée)</p>	<p>Congelée</p> <p>La température «CONGELÉE» apparaît automatiquement avec le mode « décongélation »</p>			