

## Étapes à suivre

1. Nettoyer la zone cutanée avec un savon à l'alcool
2. Appliquez les deux capteurs.
3. Exercer une légère pression sur les capteurs pendant 5 secondes pour assurer l'adhérence.

## Démarrage de l'INVOS

1. Allumez l'interrupteur situé derrière l'appareil.
2. Appuyer sur le bouton "ON" situé à l'avant.
3. Appuyez sur "Nouveau patient"
4. Entrer le numéro de dossier du patient
5. Appuyez sur "Suivant"
6. Appuyez sur "Terminé"
7. Connectez les capteurs.
8. Attendez qu'une valeur s'affiche à l'écran.
9. Appuyez sur "Baseline Menu".
10. Appuyez sur "Définir la ligne de base".
11. Regardez l'écran pour vous assurer que toutes les informations de base sont affichées.
12. Appuyez sur "Alarm On/Off" pour désactiver toutes les alarmes.

**Julie Robert, RRT**

Patient Monitoring and Recovery

**CELL : 514-953-6464**

**[Julie.robert@Medtronic.com](mailto:Julie.robert@Medtronic.com)**

# User Guide INVOS

Medtronic